



Patientendaten speichern & auswerten Anwendung & Kostenkalkulation

© 2022 Beecura®

Beecura System – ein EU zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse IIa

- ❖ 2016 entwickelte Jürgen Schmiedgen das Beecura system als ein Medizinprodukt für die Apitherapie und speziell Bienenstockluft Therapie um von der Allgemeinmedizin anerkannt zu werden.
- ❖ Dieser Prozess dauerte 3 Jahre. Als Teil der medizinischen Zertifizierung musste eine klinische Studie durchgeführt werden, um die Bienenstockluft Therapie als sichere Therapieform zu bestätigen.
- ❖ Nach dem EU Medizingesetz MDR darf Bienenstocklufttherapie nur in einem Bienenfreien Raum stattfinden.
- ❖ Mit Beecura can BSLT durchgeführt werden und die Anwender sind Patienten. Dazu muss mit einem Arzt oder Heilpraktiker zusammengearbeitet werden. Ansonsten, ist die Anwendung Wellness und der Anwender ein BSL Anwender.

Beecura System – ein EU zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse IIa

- ❖ Das Medizinproduktegesetz besagt, „Wenn ein Medium – Bienenluft - durch ein Gerät direkt in den menschlichen Körper gelangt, muss das Gerät ein Medizinprodukt sein.“
- ❖ Bienenstockluft soll in der Apitherapie als Naturheilverfahren in Form einer Therapie angeboten werden.
- ❖ Therapiestationen an Krankenhäusern und Reha- Kliniken
Apitherapie als medizinische Anwendung

Voraussetzungen für die Anwendung der Bienenstockluft

Die Anwendungen nur bei Temperaturen über 15° Celsius

Es gibt zwei Anwendungsmöglichkeiten der Bienenstockluft.

1. Die **private Anwendung** für das familiäre Umfeld. Hier gelten die gleichen Regeln der Imkerei. Die Anwendungen erfolgen auf eigene Verantwortung. Es wird keine Vergütung verlangt. Die Heilkunde wird nicht ausgeübt.
2. Die **Anwendung am Patienten** ist eine Therapie. Es werden fremde Personen (Patienten) behandelt. Ein Arzt oder Heilpraktiker übt die Heilkunde aus. Der Patient bekommt eine Rechnung vom Arzt oder Heilpraktiker über die gesamte Therapie.

Ablauf der Bienenstockluft Therapie

- ❖ Vor der ersten Behandlung - Untersuchung und Anamneseerhebung durch einen Arzt oder Heilpraktiker.
- ❖ Führen Sie einen 10-minütigen Test mit Bienenstockluft mit einem Arzt oder Heilpraktiker durch. Nach 24 Stunden kann die erste Anwendung erfolgen.
- ❖ Die ständige Anwesenheit des Arztes oder Heilpraktikers bei den Behandlungen ist nicht erforderlich.
- ❖ Das Personal in der Therapiestation ist für die Koordination aller Behandlungen und den sauberen und funktionsfähigen Zustand der Station verantwortlich. Das Personal ist geschult im Umgang mit einem allergischen oder anaphylaktischen Schock.

Empfohlen bei folgenden Indikatoren

- ❖ Heuschnupfen
 - ca. 6 Anwendungen
- ❖ Asthma
 - ab 12 Anwendungen
- ❖ COPD
 - ab 12 Anwendungen
- ❖ Infektanfälligkeit
- ❖ chronische Kopfschmerzen
- ❖ Erweiterung der Lungenfunktion




Erfahrung mit den Anwendungen

- ❖ Ausgewertet wurden insgesamt 32 Patienten.
- ❖ Sie wurden über den Grund ihrer Anwendung befragt.
- ❖ Abschließend wurden sie befragt, ob es
 - eine deutliche Verbesserung,
 - eine leichte Verbesserung,
 - keine Verbesserung,
 - oder eine Verschlechterung gab.


Erfahrung mit den Anwendungen

Ergebnis: deutliche Verbesserung bei 20 Nutzern

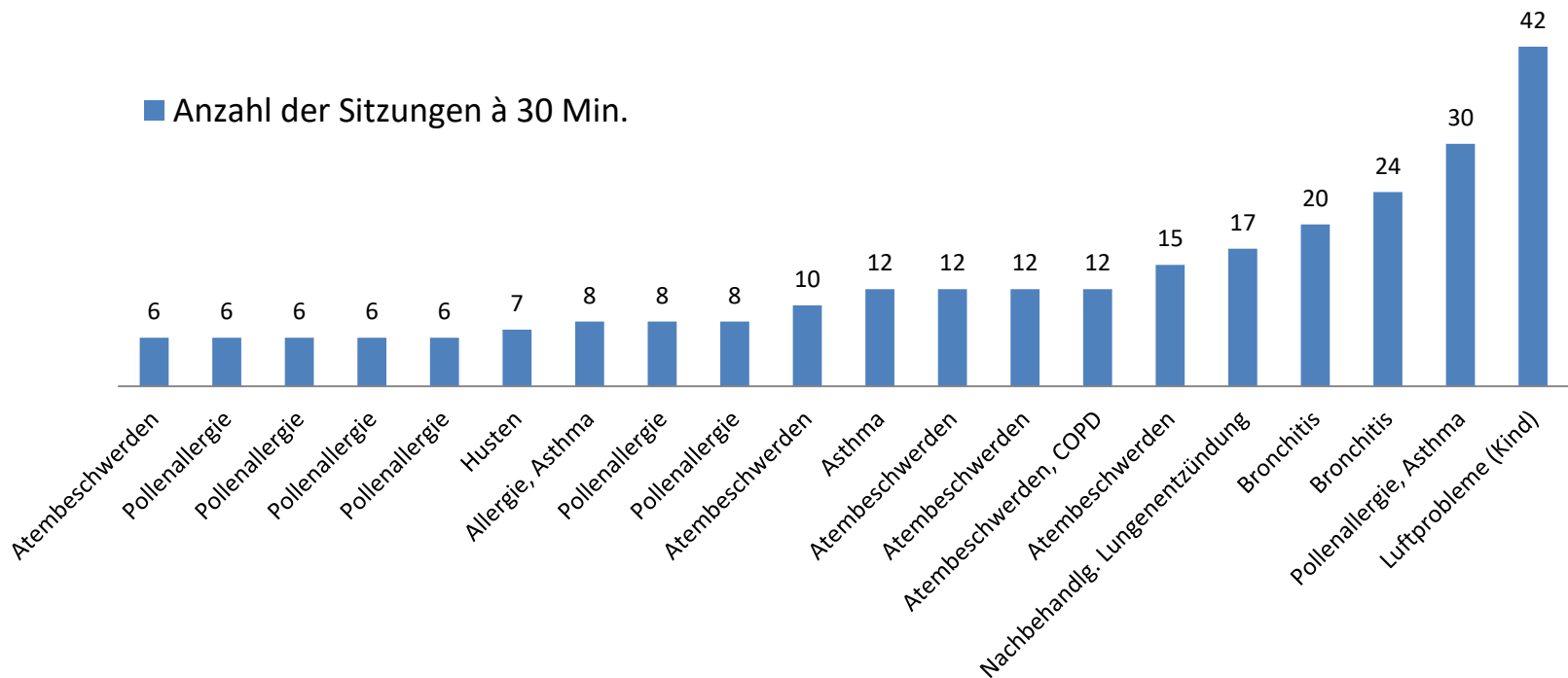


Erfahrung mit den Anwendungen

Ergebnis: leichte Verbesserung bei 8 Nutzern

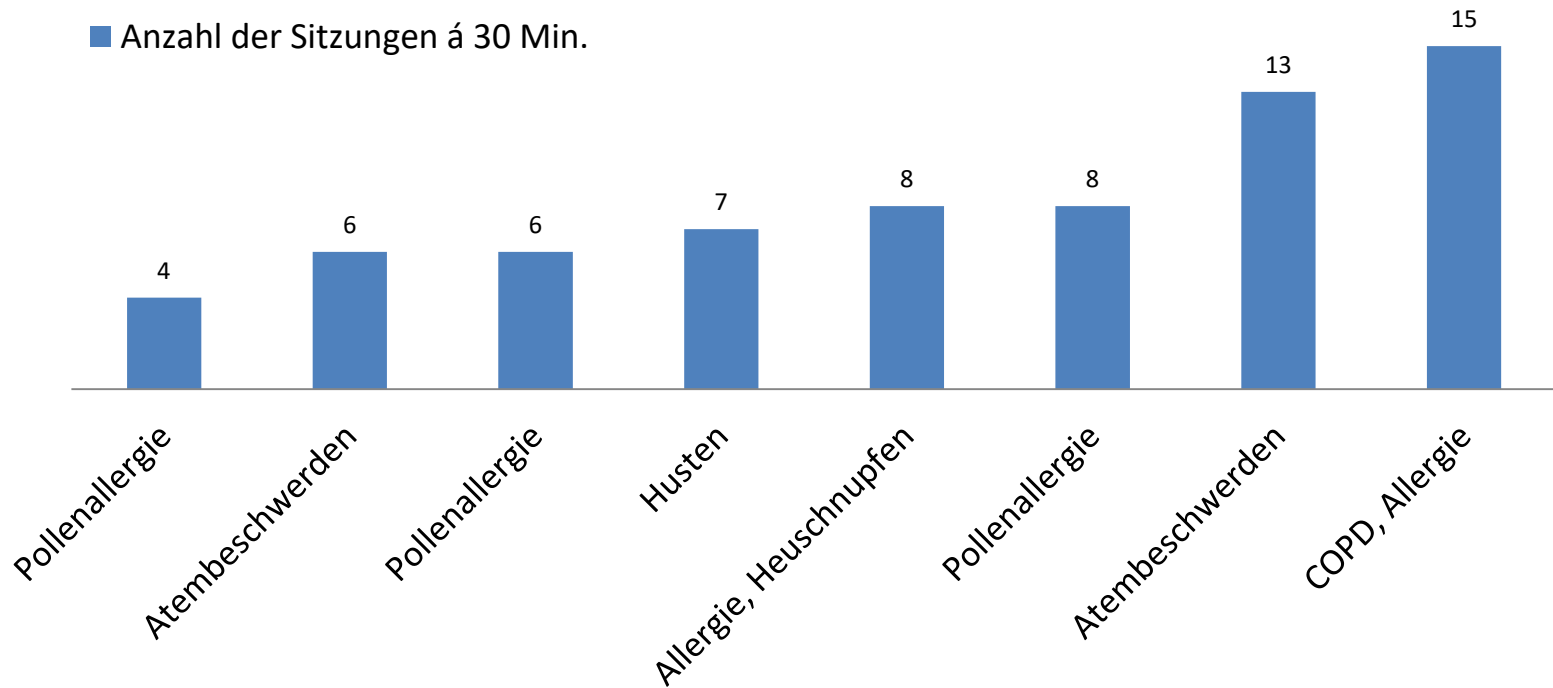

Erfahrung mit den Anwendungen

Ergebnis: keine Verbesserung bei 4 Nutzern

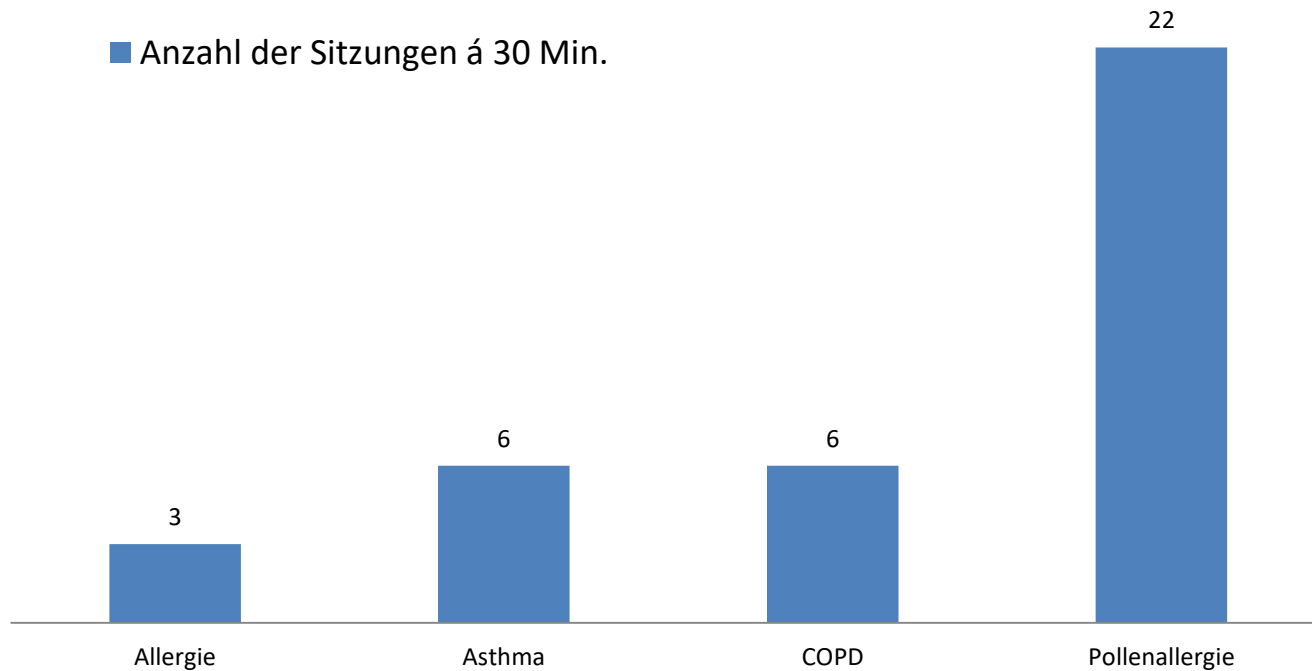


Erfahrung mit den Anwendungen

Ergebnis: Verschlechterung bei 0 Nutzern


- Anzahl der Sitzungen á 30 Min.

Keine Verschlechterung bei insgesamt 0


Erfahrung mit den Anwendungen

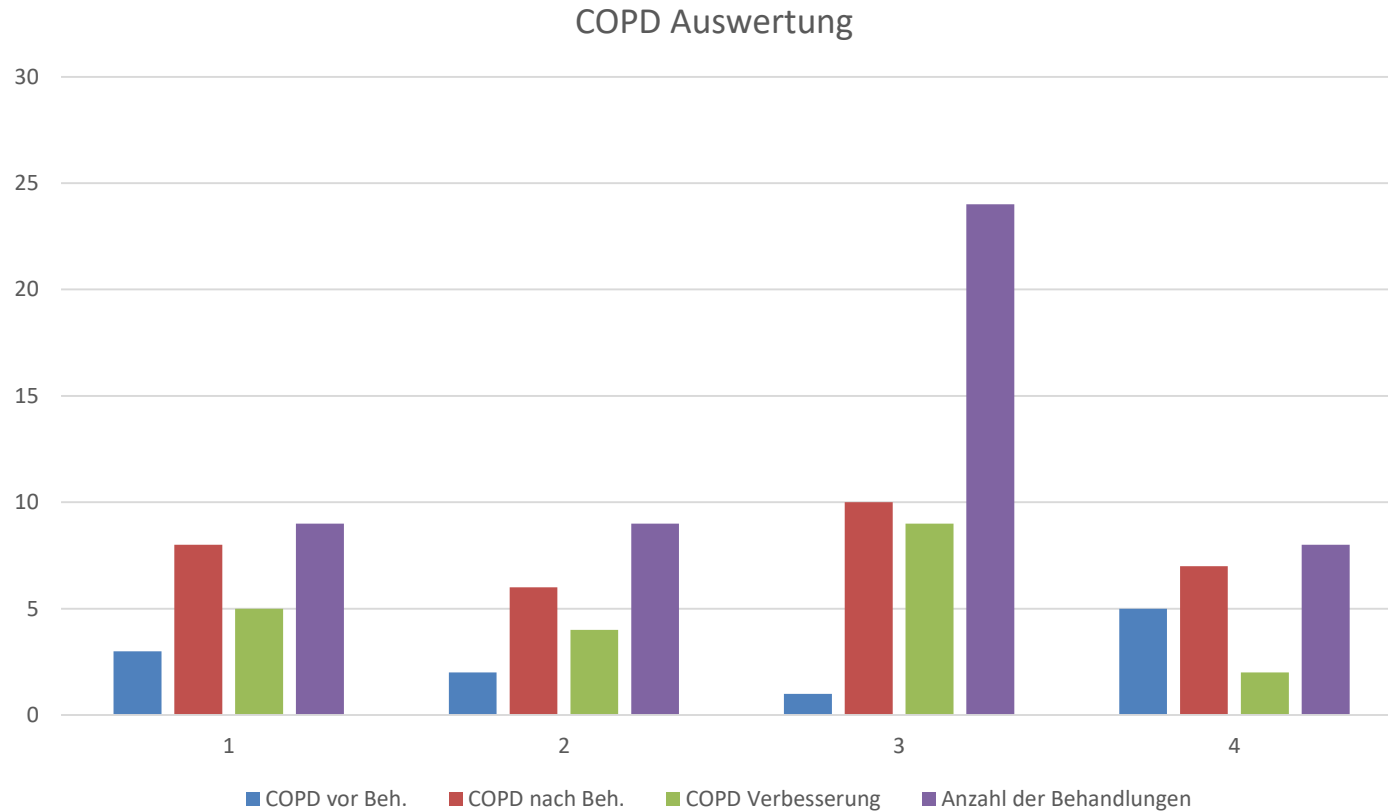

Erfahrung mit den Anwendungen

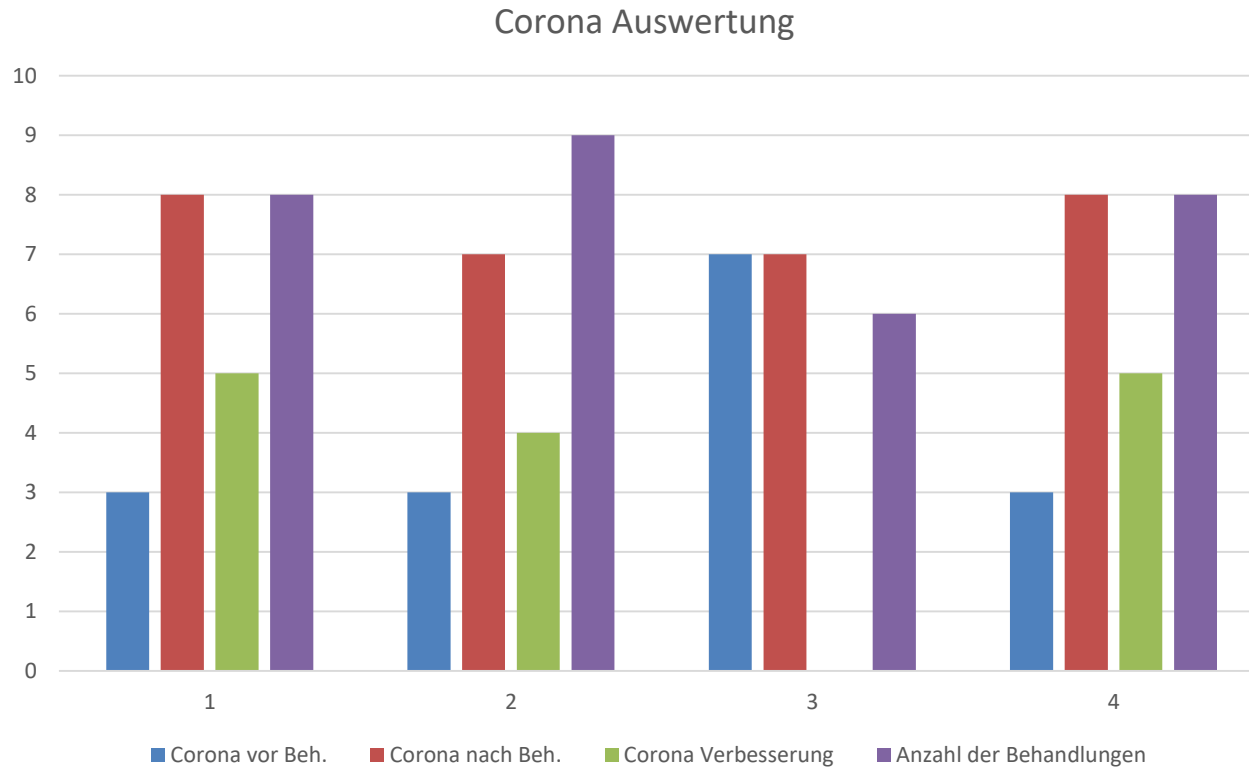


Erfahrung mit den Anwendungen

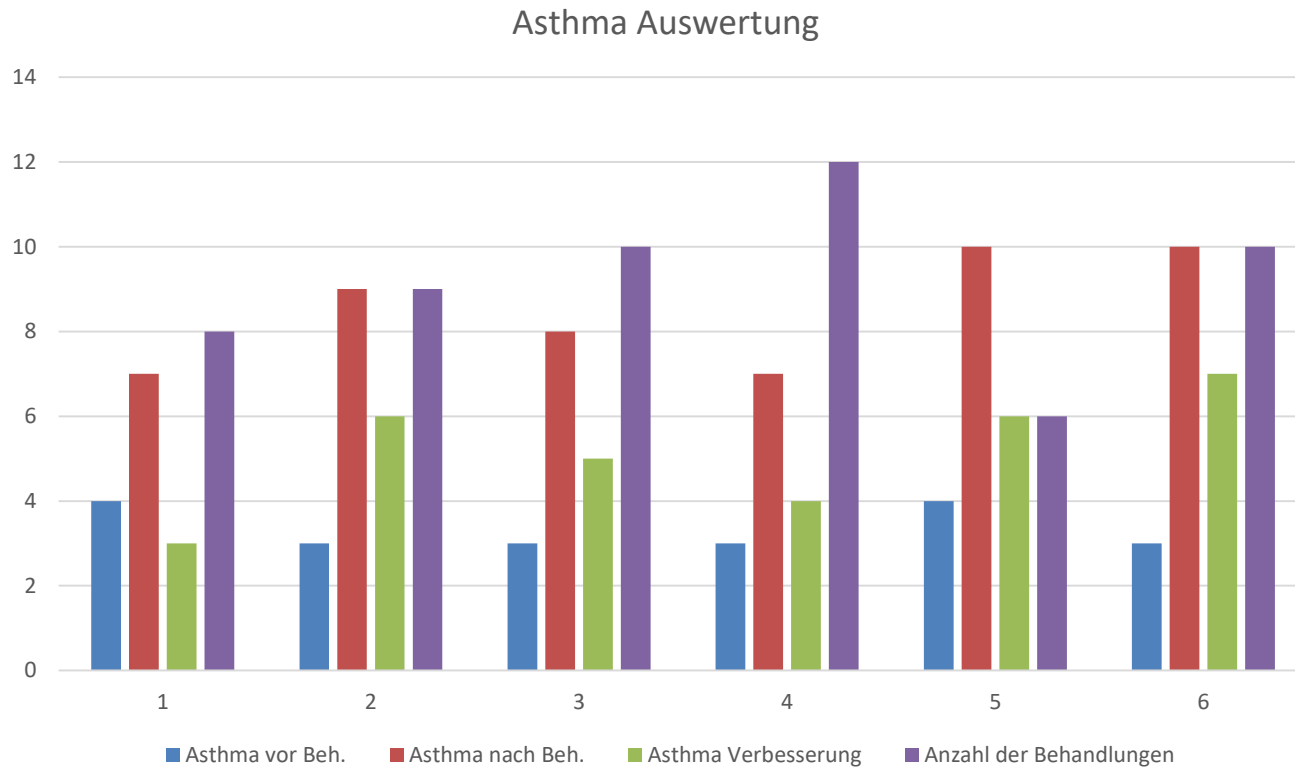

Erfahrung mit den Anwendungen

Heuschnupfen Pollenallergie Auswertung

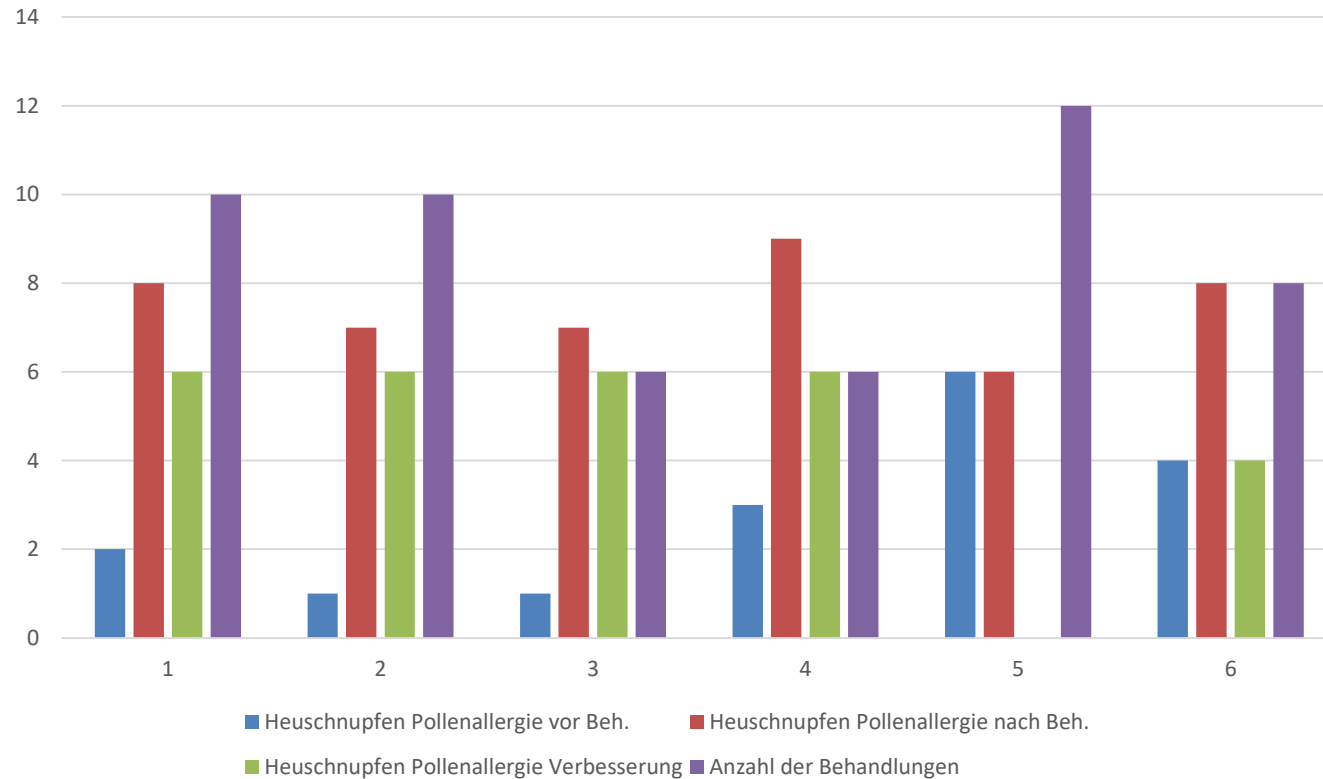

Auslastung der Völker bei der Anwendung

Belegung der Therapieplätze - Auslastung der Völker bei artgerechter Haltung

Platz	Volk	10 Uhr	11 Uhr	12 Uhr	13 Uhr	14 Uhr	15 Uhr	16 Uhr	17 Uhr	18 Uhr	19 Uhr	20 Uhr	21 Uhr
1	Volk 1	■		■		■		■		■		■	
	Volk 2		■		■		■		■		■		■
2	Volk 3			■		■		■		■		■	
	Volk 4		■		■		■		■		■		■
3	Volk 5	■		■		■		■		■		■	
	Volk 6		■		■		■		■		■		■
													14

Platz	Volk	10 Uhr	11 Uhr	12 Uhr	13 Uhr	14 Uhr	15 Uhr	16 Uhr	17 Uhr	18 Uhr	19 Uhr	20 Uhr	21 Uhr
1	Volk 1	■		■		■		■		■		■	
	Volk 2		■		■		■		■		■		■
2	Volk 3			■		■		■		■		■	
	Volk 4		■		■		■		■		■		■
3	Volk 5	■		■		■		■		■		■	
	Volk 6		■		■		■		■		■		■
4	Volk 7		■		■		■		■		■		■
	Volk 8	■		■		■		■		■		■	
													13

Platz	Volk	10 Uhr	11 Uhr	12 Uhr	13 Uhr	14 Uhr	15 Uhr	16 Uhr	17 Uhr	18 Uhr	19 Uhr	20 Uhr	21 Uhr
1	Volk 1	■		■		■		■		■		■	
	Volk 2		■		■		■		■		■		■
2	Volk 3			■		■		■		■		■	
	Volk 4		■		■		■		■		■		■
3	Volk 5	■		■		■		■		■		■	
	Volk 6		■		■		■		■		■		■
4	Volk 7		■		■		■		■		■		■
	Volk 8	■		■		■		■		■		■	
5	Volk 9		■		■		■		■		■		■
	Volk 10	■		■		■		■		■		■	
													14

- ❖ Zwei Bienenvölker bilden einen Therapieplatz,
- ❖ Ein Wechsel erfolgt nach 15 Minuten.
- ❖ Therapie nur bei Temperaturen über 15°C
- ❖ Jeder Patient benötigt ein individuelles Patientenset (Schlauch, Ventil, Maske)

Kalkulation der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen der Therapiestation mit drei Behandlungsplätzen						
Sitzungen pro Therapieplatz	Arbeitsaufwand pro Sitzung	Arbeitsaufwand pro Tag	Anwendungen pro Tag	Anwendungen pro Woche (6 Tage)	Anwendungen pro Monat (4 Wochen)	Anwendungen pro Jahr (5 Monate)
14 pro Tag	0,31 h	12 h	40	240	960	4800
Kalkulation			Vollauslastung		Auslastung	20%
20 % entspricht 5 Sitzungen am Tag						
40 Sitzungen a 60 €				2.400,00 €		480,00 €
12 Arbeitsstunden a - 40 €				- 480,00 €		- 96,00 €
Einnahmen pro Tag				1.920,00 €		384,00 €
Einnahmen in 6 Tagen				11.520,00 €		2.304,00 €
Einnahmen in 4 Wochen				46.080,00 €		9.216,00 €
Einnahmen im Jahr (=in 5 Monaten)				230.400,00 €		46.080,00 €
Kosten Imker 1000 € pro Volk				- 6.000,00 €		- 6.000,00 €
Ertrag vor Steuern pro Jahr				224.400,00 €		40.080,00 €

Kalkulation der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen der Therapiestation mit drei Behandlungsplätzen						
Sitzungen pro Therapieplatz	Arbeitsaufwand pro Sitzung	Arbeitsaufwand pro Tag	Anwendungen pro Tag	Anwendungen pro Woche (6 Tage)	Anwendungen pro Monat (4 Wochen)	Anwendungen pro Jahr (5 Monate)
14 pro Tag	0,31 h	12 h	40	240	960	4800
Kalkulation			Vollauslastung		Auslastung	30%
			30 % entspricht 12 Sitzungen am Tag			
40 Sitzungen a 60 €				2.400,00 €		720,00 €
12 Arbeitsstunden a - 40 €				- 480,00 €		- 144,00 €
Einnahmen pro Tag				1.920,00 €		576,00 €
Einnahmen in 6 Tagen				11.520,00 €		3.456,00 €
Einnahmen in 4 Wochen				46.080,00 €		13.824,00 €
Einnahmen im Jahr (=in 5 Monaten)				230.400,00 €		69.120,00 €
Kosten Imker 1000 € pro Volk				- 6.000,00 €		- 6.000,00 €
Ertrag vor Steuern pro Jahr				224.400,00 €		63.120,00 €

Kalkulation der Wirtschaftlichkeit

empfohlene Preise für die Behandlung von Bienenstockluft Therapie mit dem BCS-IH16
ab 2022

Anzahl der Behandlungen	Preis Patienten	Preis für Kinder - 40 %	Preisberechnung Patienten	Preisberechnung Kinder - 40%	Summe für Behandlung gerundet	berechnet bis oder ab Anzahl der Behandlungen
6	360.00 €	215.00 €	360.00 €	216.00 €	60.00 €	bis 6
10	580.00 €	345.00 €	580.00 €	348.00 €	58.00 €	von 7 bis 12
12	695.00 €	415.00 €	696.00 €	417.60 €	54.00 €	ab 13
16	860.00 €	515.00 €	864.00 €	518.40 €		
20	1,070.00 €	645.00 €	1,080.00 €	648.00 €		
24	1,280.00 €	768.00 €	1,296.00 €	777.60 €		
30	1,600.00 €	960.00 €	1,620.00 €	972.00 €		
Patientenbox Verkauf		80.00 €				
Ventilwechsel nach 10 Sitzungen und jedes Jahr bei Beginn der Therapie inclusive im Behandlungspreis						
Ventil bei 20 Stück 6,30 € / bei 50 Stück 5,50 € Netto						

Was gibt es noch Neues

Neue Angebote:

- ❖ Die Nutzung der Markenrechte, des Logos, der Werbetexte, Fotos und Videos
- ❖ Die Veröffentlichung der relevanten Standort- und Betreiberdaten der Station auf unserer Homepage
- ❖ Eine Lizenz für das Buchungsprogramm, Speicherung und Verwaltung von Patientendaten, Terminverwaltung, Auswertung und von Patientendaten
- ❖ Garantieverlängerung für Betreiber von Stationen

Was gibt es noch Neues

Erste Therapiestation in Österreich
Christoph Haslauer
Handelsvertreter für Österreich



FAVORIT 2021

Mit dieser Auszeichnung würdigen die Redaktion des im ORF Landesstudio NÖ produzierten österreichweiten ORF Magazins „Land und Leute“ und die Seherinnen und Seher die Leistung von Landwirt und Imker Christoph Haslauer aus St. Ulrich in Oberösterreich.

Christoph Haslauer hat mit seiner Imkerei bewiesen, wie man mit Qualitätsbewusstsein, naturnaher Produktion, aber auch Mut zu Neuem für Wertschöpfung in der Region sorgen kann. Mit der Bienenstock-Lufttherapie hat er neue Wege beschritten und nützt die Kraft der Natur zum Wohl von Menschen. Ein vorbildhafter Betrieb, der mit einer Nische in der Landwirtschaft erfolgreich ist und mit dem Erhalt von Artenvielfalt und der Bewahrung von Bienenvölkern auch einen nachhaltigen Nutzen für Natur und Umwelt ermöglicht.


Bei der „Land und Leute“-Favoritenwahl haben die Zuseherinnen und Zuseher dies mit den meisten Stimmen honoriert und

Christoph Haslauer
aus St. Ulrich in Oberösterreich

zum Publikumsliebbling gewählt.

Die „Land und Leute“-Redaktion gratuliert sehr herzlich!


Prof. Norbert Gollinger
Landesdirektor ORF NÖ

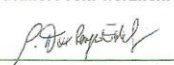

Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer
Leitung „Land und Leute“

St. Pölten, November 2021



 **beecura**[®]
SYSTEM

Therapiestationen auf einer Karte

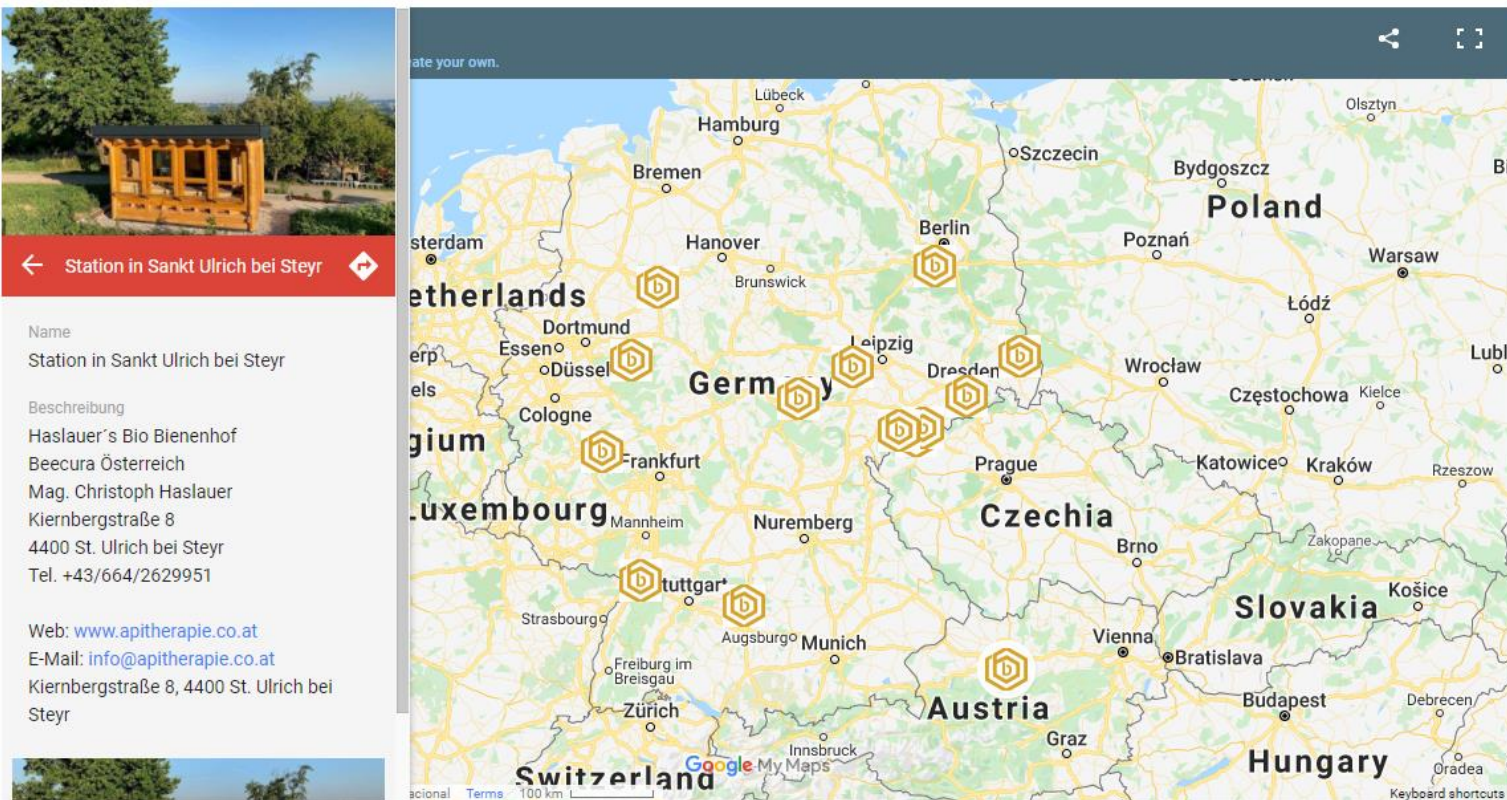

Station in Sankt Ulrich bei Steyr

Name
Station in Sankt Ulrich bei Steyr

Beschreibung
Haslauer's Bio Bienenhof
Beecura Österreich
Mag. Christoph Haslauer
Kiernbergstraße 8
4400 St. Ulrich bei Steyr
Tel. +43/664/2629951

Web: www.apitherapie.co.at
E-Mail: info@apitherapie.co.at
Kiernbergstraße 8, 4400 St. Ulrich bei Steyr

Map showing therapy stations (marked with beehive icons) across Central Europe, including Germany, Austria, Czechia, Slovakia, and Hungary. Major cities like Berlin, Prague, Vienna, and Bratislava are visible.

Zusammenfassung

- ❖ Verbesserung der Auswertung durch Verwendung eines einheitlichen „Anamnesebogens“
- ❖ Anerkennung durch die Krankenkassen
- ❖ Möglichkeiten für weitere medizinische Studien

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Beecura GmbH

Hauptsitz

Am Gewerbegebiet 5
09474 Crottendorf
Deutschland

Beecura Ltd

Internationaler Vertrieb

1 Rushmills
NN4 7YB Northampton
Großbritannien

Telefon: +49 37344 13435-0
E-Mail: info@beecurasystem.de;
Internet: www.beecurasystem.de



Jürgen
Schmiedgen
MD Beecura GmbH



Beate McKenzie
MD Beecura Ltd

